


サマリタン PAD 350P・450P 簡易操作説明


※詳しくは付属のユーザーマニュアルを確認して下さい。

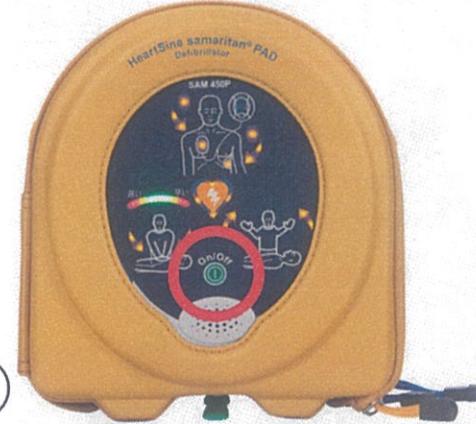

- ① 緑の電源ボタンを押す。



- ② 緑のタブを引き、パッドを取り出す。

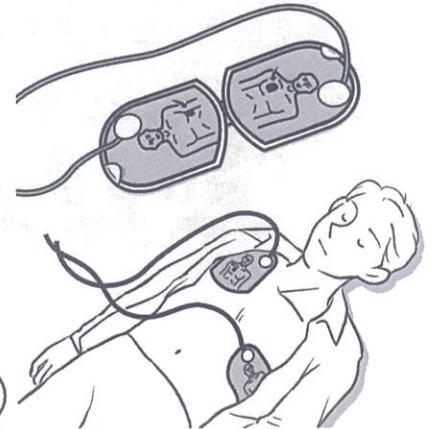

- ③ 電極パッドを絵の通り素肌に貼る。



- ④ 心電図の解析が始まる。
傷病者に触れない。



- ⑤ ショックボタンが点滅したら
ボタンを押す。



カバーの上から
操作可能です

右記 QR コードを読み取ると、
動画でご確認いただけます。

サマリタンを用いた
一時救命処置の手順



一次救命処置(BLS)の手順

★本手順(イラスト図)データをご希望の方は当社ホームページよりご用命ください。

<https://aed.yagami-inc.co.jp>

