

# AEDの使用法

## 簡単 3 ステップ!

### 1 フタを開ける

自動的に電源がオンになり、音声ガイドが流れます




### 2 パッドを貼る

音声ガイドに従って落ち着いて行動してください



胸部の衣服を脱がす

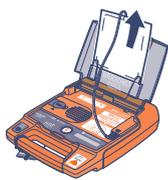

AED本体から電極パッドを取り出す



電極パッドのパッケージを開ける




パッドをケーブル側からゆっくりとねいにはがす



右上胸部にパッドを貼る



もう一枚のパッドをケーブル側からゆっくりとねいにはがす

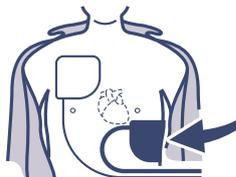

心臓の左下にパッドを貼る

パッドを貼ると、心電図の解析が始まります  
体にさわらずに次の音声ガイドを待ちます

### 3 操作ボタンを押す

電気ショックが必要な心電図と判断すると、エネルギーの充電後操作ボタンが点滅します



体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと押してください。



周囲の安全を確認し、操作ボタンを押します。  
(アナウンス後30秒以内)